


NOMBRE FICHA TÉCNICA DE DE REUSO		CODIGO 06-1-FT-021
TIPO DE DOCUMENTO FORMATO	PROCESO MISIONAL	VERSIÓN 001
FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS: VALVULA ESPIRATORIA		Anexo 1.
	CLASIFICACION DEL RIESGO	II a
	NUMERO DE REUSO	Según desgaste
	SERIAL DEL DISPOSITIVO	8413660 _ 8417050
	MATERIALES DEL DISPOSITIVO	Poliamida
	PARTES	Diafragma, anillo, valvula de espiración

DEFINICIÓN:	Válvula de espiración reusable para el empleo de los ventiladores de terapia intensiva Drager.
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO	Tras su uso, sumerja el dispositivo inmediatamente en jabón enzimático con el fin de remover materia orgánica y/o secreciones. Se procede a llevarlo a la CE en un container, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar en bolsa roja aparte con el rotulo "INFECTADO".
DESINFECCIÓN	Sumergido en solución de cidex opa
ESTERILIZACIÓN	Esterilización a vapor 134°C durante 15 minutos
PRECAUCIONES	Observar si hay signos de daños grietas o deterioro evidente de las partes que conforman la valvula. Desenroscar el tapón de cierre con la mano y extraerlo junto con la membrana.
DISPOSICIÓN FINAL	Despues de cumplir su vida util se desecha en recipiente de riesgo biologico (rojo)

VERIFICACIÓN ANTES DE SU USO		
En excelentes condiciones de limpieza y desinfección y estado físico. (no este quebradiza o se evidencie fallo durante el chequeo del ventilador)		
PUNTOS A VERIFICAR	SI	NO