

NOMBRE FICHA TÉCNICA DE DE REUSO		
TIPO DE DOCUMENTO FORMATO	PROCESO MISIONAL	

FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS: ASPIRADOR DE SECRECIONES		
	CLASIFICACION DEL RIESGO	II a
	NUMERO DE REUSO	Según desgaste
	SERIAL DEL DISPOSITIVO	smaf SXT 5A
	MATERIALES DEL DISPOSITIVO	
	PARTES	Botella de almacenamiento y tapa

DEFINICIÓN:	Aspirador de secreciones compuesto por botella y tapa
AREA DE USO DEL DISPOSITIVO	Tras su uso, sumerja el dispositivo inmediatamente en jabón enzimático con el fin de remover y/o secreciones. Se procede a llevarlo a la CE en un container, en caso de haber tenido contacto de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar en bolsa roja aparte con el rotulo 'Contenedor de riesgo biológico'.
DESINFECCIÓN	Sumergido en solución desinfectante Perasef
ESTERILIZACIÓN	Esterilización a 121° por 20 minutos
PRECAUCIONES	No esterilizar la tapa a vapor
DISPOSICIÓN FINAL	Despues de cumplir su vida util se desecha en recipiente de riesgo biológico

VERIFICACIÓN ANTES DE SU USO		
En excelentes condiciones de limpieza y desinfección y estado físico.		
PUNTOS A VERIFICAR	SI	
La tapa debe sellar		
No filtración		

CODIGO
06-1-FT-021

VERSIÓN **001**

Anexo 1.

pa de la botella

nover materia orgánica
ntacto con secreciones
'INFECTADO".

co (rojo)

NO