
	<b>NOMBRE</b> <b>FICHA TÉCNICA DE DE REUSO</b>		<b>CODIGO</b> <b>06-1-FT-021</b>
	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b> <b>FORMATO</b>	<b>PROCESO</b> <b>MISIONAL</b>	<b>VERSIÓN 001</b>

## FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS

### AMBU

	<b>CLASIFICACION DEL RIESGO</b>	Clase II a
	<b>Nº REUSOS</b>	40
	<b>MATERIALES</b>	
	SILICONA	
	<b>PARTES</b>	
	1-Mascara, 2-Conector espiratorio (membrana de conector+alojamiento de membrana),3-bolsa autoinflable, 4-Valvula de conexión a bolsa con membranas(3), 5-Bolsa de reservorio, 6-Manguera lisa.	

#### LIMPIEZA

#### AREA DE USO DEL DISPOSITIVO:

Tras usar el AMBU, se procede a desarmar el dispositivo en cada una de sus partes para luego proceder a sumergirlas en container con Detergente Enzimatico para remover materia organica y secreciones. Posteriormente sera llevado a la CE en un container, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar en bolsa roja aparte con el rotulo "INFECTADO"

#### CENTRAL DE ESTERILIZACION:

Despues de estar sumergido en jabon enzimatico por un periodo de 10 minutos se procede a enjuagar las partes del AMBU con agua para despues hacer limpieza mecanica con la ayuda de un cepillo de cerdas suaves, se procede luego a secar con aire comprimido, para posterior armado. Comprobar la limpieza mediante visualizacion detallada del dispositivo tras el secado con aire comprimido.

#### DESINFECCION:

NO APLICAN

#### ESTERILIZACION:

La esterilizacion a utilizar sera el Vapor de agua (Autoclave) u Oxido de Etileno.

#### DISPOSICION FINAL:

**Area de uso del dispositivo:**Una vez concluido el ciclo de reuso de este dispositivo, proceder a enviarlo

**Central de esterilizacion:**Tras terminado el ciclo de uso del DM, se procede a inactivarlo mediante ester

#### PRECAUCIONES:

El dispositivo no debe ser sumergido en desinfectantes o quimicos como glutaraldeido (Cidex), con el fin de desinfectar o esterilizar el DM, No se reesterilizaran los DM usado en pacientes con infecciones de VIH, HEPATITIS O TUBERCULOSIS.

#### REFERENCIA:

Los procesos de lavado, desinfeccion y esterilizacion son fundamentados en el Manual de esterilizacion para centros de salud de la Organización Panamericana de la Salud. Los parametros de manejo y procesamiento del dispositivo son los especificados por el fabricante.