

	<h1>BOQUILLA</h1>	CÓDIGO	
		MB-142	
		EDICIÓN:	1
			
<p>NOMBRE Boquilla reutilizable (Mb-142).</p> <p>DESCRIPCION Bloqueo de mordidas reutilizable</p> <p style="text-align: center;">CARACTERISTICAS</p> <p>USO En unidades de gastroenterología.</p> <p>ESPECIFICACIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Todos los endoscopios gastrointestinales con un diámetro exterior del tubo de inserción máxima de 15mm o menos • Compatible con autoclave • Dispositivo reutilizable siguiendo los protocolos de limpieza y desinfección establecidos por Olympus o su disposición será de acuerdo al estado del mismo. <p>COMPOSICIÓN Polímeros</p> <p>PRESENTACIÓN Unidad.</p> <p>REGISTRO INVIMA 2017DM-0017145</p> <p>FECHA DE VENCIMIENTO 14 de noviembre de 2027</p> <p>PRECAUCIONES Ser utilizado por personas especializadas en el área.</p>			

CONTRAINDICACIONES

Evitar golpes, dobleces o malformaciones.

PROTOCOLO DE REPROCESAMIENTO.

- 1) **Inmersión:**
 - A) Sumerja el instrumento en una solución detergente inmediatamente después de haberlo utilizado
 - B) Limpie con un paño que no suelte pelusa. Puede sumergirlo desde 3 minutos, hasta 5 horas.
- 2) **Enjuague:**
 - A) Enjuague el instrumento con agua corriente limpia.
 - B) Seque muy bien con un paño que no deje pelusa o con aire comprimido.
- 3) **Desinfección**
 - A) **Sumerja el instrumento en una solución desinfectante que lo cubra completamente, el tiempo establecido por fábrica.**
 - B) **Enjuague el instrumento con agua corriente limpia.**

Si desea esterilizar siga este pasos

- 4) **Autoclave:**
 - A) Coloque el instrumento en el empaque adecuado, según método de esterilización. Tener en cuenta la forma de empaque inicial de fábrica
 - B) Tener en cuenta las siguientes indicaciones.
 - C)

ESTRILIZACION	TEMPERATURA	TIEMPO DE EXPOSICION
PREVACIO	132°C a 134°C	5 MINUTOS

- 5) **Empaque:**
 - A) Los instrumentos de endoterapia debe guardarse dentro de empaque estéril, en un lugar limpio y seco a temperatura ambiente.
 - B) El instrumento empacado no debe almacenarse en un lugar expuesto a luz directa del sol ni debe quedar presionado por otros objetos.

DISPOSICION DE DESECHO

Según protocolo de la institución

MARCA

OLYMPUS

